

Dentaid Fittydent

Instructies voor gebruik

In het Fittydent assortiment zijn drie producten opgenomen:

Fittydent Kleefstrips

Toepassing: Alleen geschikt voor prothesen van de onderkaak

Gebruik:

- 1) Maak de gebitsprothese schoon onder de kraan (met een protheseborstel)
- 2) Maak de gebitsprothese goed droog
- 3) Knip de strip eventueel bij om deze goed passend te maken
- 4) Plak de kleefstrip aan de binnenzijde van de onderprothese en druk de strip stevig aan
- 5) Plaats de prothese in de mond en bijt de kaken stevig op elkaar
- 6) Bij voorkeur 15 minuten niet eten of drinken

Fittydent Kleefpasta

Toepassing: Geschikt voor boven- en onderprothesen.

Gebruik:

- 1) Maak de gebitsprothese schoon onder de kraan (met een protheseborstel)
- 2) Maak de gebitsprothese goed droog
- 3) Breng een geringe hoeveelheid Fittydent aan (in “stipjes”). Breng indien dit noodzakelijk blijkt te zijn de volgende keer meer Fittydent Kleefpasta aan
- 4) Plaats de gebitsprothese in de mond en bijt de kaken even stevig op elkaar
- 5) Bij voorkeur 15 minuten niet eten of drinken

Fittydent Reinigingstabletten

Toepassing: Geschikt voor de reiniging van gebitsprothesen. Maakt de gebitsprothese goed schoon en verwijdert eventuele restjes Fittydent Kleefpasta en Kleefstrip.

Gebruik:

- 1) Reinig de gebitsprothese gedurende minimaal 30 minuten in een glas handwarm water met daarin opgelost 1 tablet Fittydent. Langere reiniging mag ook bijvoorbeeld gedurende de nacht.
- 2) Na de reiniging de gebitsprothese goed afspoelen en drogen alvorens Fittydent Kleefpasta of Kleefstrip aan te brengen.